



epitact®  
SPORT



# CATALOGUE EPITACT® SPORT

PROTÉGER | CORRIGER | SOULAGER



epitact<sup>®</sup>  
SPORT



**FICHES  
PRODUITS**

- **FONCTIONNALITÉS** : La genouillère proprioceptive EPITHELIUMFLEX®01 a été spécialement conçue pour les sports unidirectionnels (randonnée, course à pied, ski de fond, vélo, VTT...). Elle peut être portée en période douloureuse pour aider à soulager le genou mais aussi en prévention sur du long terme.
- **UNE ACTION STABILISATRICE** : Son tendon de maintien en silicone breveté EPITHELIUMFLEX® associé au tissu de compression ultra performant REFLEX améliore le maintien rotulien et la stabilité du genou.
- **UNE ACTION PRÉVENTIVE** : La genouillère évite la peur de renouer avec la douleur ou de voir votre genou se dérober. La sécurisation du genou fragile permet de ne pas reporter toutes les contraintes mécaniques sur l'autre genou et par la même occasion de prévenir les blessures.
- **ERGONOMIE** : La genouillère ne glisse pas et ne provoque aucune gêne derrière le genou (pli poplité). Ultra légère (- de 60 g) et extra fine, elle peut se porter sous tous types de vêtements.
- **ENTRETIEN** : Lavable en machine à 40°C.
- **PRÉCAUTIONS** : Ne pas utiliser en cas d'artérite, d'état variqueux important, de séquelles de phlébite ou d'œdème (lymphatique/veineux) de la jambe et/ou de la cuisse de manière à ne pas entraver la circulation.



	Vendue à l'unité. <b>Comment choisir votre taille :</b> Mesurez la circonférence de votre genou en position semi-fléchiée en plaçant votre mètre au centre de la rotule.				
	XS $\bigcirc \leq 35\text{cm}$	S $35 < \bigcirc \leq 38\text{cm}$	M $38 < \bigcirc \leq 41\text{cm}$	L $41 < \bigcirc \leq 44\text{cm}$	XL $\bigcirc > 44\text{cm}$
<b>RÉFÉRENCES</b>	G010	G011	G012	G013	G014
<b>EAN</b>	3660396006238	3660396006245	3660396006252	3660396006269	3660396006276



VU  
à la  
TV



# GENOUILLÈRE | EPITHELIUM FLEX 01

Cette genouillère ultra légère a été développée pour les sports unidirectionnels (randonnée, course à pied, vélo...). Elle peut être portée en période douloureuse pour vous aider à soulager votre genou mais aussi en prévention sur du long terme.

- **UNE ERGONOMIE INCOMPARABLE** : Concentré de technologies dans moins de 60g, la genouillère EPITHELIUMFLEX 01 ne glisse pas et ne provoque aucune gêne derrière le genou (pli poplité). Extra fine, elle peut se porter sous tous types de vêtements.
- **UNE ACTION DE MAINTIEN** : Son tendon de maintien en silicone breveté EPITHELIUMFLEX® associé au tissu de compression REFLEX améliore le maintien rotulien et la stabilité de votre genou. La genouillère EPITHELIUMFLEX 01 accompagne le mouvement en optimisant la fluidité de votre geste sans l'entraver afin de préserver votre capital musculaire.
- **UNE ACTION PROPRIOCEPTIVE** : le contact de la genouillère sur la peau favorise la stimulation sensorielle, potentiellement défaillante, et pourtant nécessaire à une bonne proprioception (perception de son corps dans l'espace). Elle contribue ainsi à l'alignement des segments osseux et à la qualité de votre geste.



**LE SAVIEZ VOUS?** Les sports d'endurance (course à pied, trail et randonnée) induisent des mouvements répétitifs entraînant une fatigue musculaire mais aussi une diminution de la proprioception. Les mouvements deviennent moins fluides, le genou est alors soumis à davantage de microtraumatismes. Cela peut générer une usure du cartilage, des lésions tendineuses et ligamentaires, d'où l'apparition de douleurs récurrentes. Ce risque est d'autant plus important si le genou a déjà subi des traumatismes (rupture des ligaments, entorse...).

La genouillère EPITHELIUMFLEX 01 a été spécialement conçue pour limiter les risques de blessures en palliant les effets néfastes de la répétition et de la fatigue. Elle vous apporte soutien et confort tout en se faisant oublier !



**NE GLISSE PAS**  
→ Bande élastique avec picots en silicone


ULTRA  
LIGHT 60g  
TECHNOLOGIE  
BREVETÉE

**MAINTIEN**  
→ Tendon en silicone EPITHELIUMFLEX®

**CONSEIL** : L'activité physique est un élément crucial pour lutter contre l'aggravation de l'arthrose. Le cartilage du genou est un tissu peu vascularisé, sa nutrition dépend du mouvement de l'articulation. Le repos complet pour éviter la douleur est tout aussi néfaste que des traumatismes répétés. La Genouillère EPITACT® est idéale pour continuer toutes vos activités sportives et de loisirs.



## Comment choisir votre taille ?

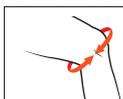

Mesurez la circonférence de votre genou en position semi-fléchée en plaçant votre mètre au centre de la rotule.

XS $\bigcirc \leq 35$ cm	S $35 < \bigcirc \leq 38$ cm	M $38 < \bigcirc \leq 41$ cm	L $41 < \bigcirc \leq 44$ cm	XL $\bigcirc > 44$ cm
ACL: 6362922	ACL: 6362939	ACL: 6363778	ACL: 6363985	ACL: 6364387

Prix public conseillé : 59,95 € TTC

Disponible en pharmacies et magasins de sport spécialisés



PP01R

- **FONCTIONNALITÉS** : L'orthèse agit sur 3 facteurs complémentaires :
  - **UNE ACTION CORRECTIVE** : Le tendon en silicone EPITHELIUMFLEX® associé à la pastille de contre-appui permet de réaxer le gros orteil, de limiter la pronation et ainsi d'optimiser la propulsion. Lors de la pratique sportive, la qualité des appuis est primordiale pour prévenir les blessures et améliorer les performances.
  - **UNE ACTION PROTECTRICE** : Le tendon externe EPITHELIUMFLEX® permet d'absorber les pressions et les frottements sur l'exostose («oignon») et ainsi éviter les risques d'échauffements.
  - **UNE ACTION DE MAINTIEN** : Le bracelet métatarsien de contention permet de limiter l'écrasement et l'élargissement de l'avant-pied.
- **ERGONOMIE** : Concentré de technologie dans moins de 10g, l'orthèse hallux valgus EPITHELIUMFLEX® 02 a été spécialement conçue pour agir en dynamique lors de votre pratique sportive (Randonnée, course à pied...). De par sa conception brevetée intégrant la technologie EPITHELIUMFLEX®, l'orthèse souple et ultra fine s'adapte dans toutes les chaussures.
- **ENTRETIEN** : Lavable en machine à 40°C.
- **PRÉCAUTIONS** : L'orthèse ne doit pas être utilisée dans le cas où le gros orteil n'est plus mobile latéralement. Ne pas utiliser en cas de diabète et/ou artérite.



**CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE DANS MOINS DE 10g**

**SANS ORTHÈSE**

**AVEC ORTHÈSE**

Pastille de contre-appui en EPITHELIUM

Bracelet de contention

Tendon en silicone EPITHELIUMFLEX®

- Le tendon externe en silicone EPITHELIUMFLEX® permet de redresser le gros orteil. Il soulage aussi les douleurs en absorbant les pressions exercées sur l'hallux valgus.
- Le bracelet de contention extra fin et la pastille de contre-appui en Epithelium permettent de limiter l'écrasement de l'avant-pied.


	Mesurez le contour de votre pied en arrière de l'hallux valgus («oignon»).	Vendue à l'unité. (Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez la plus petite)			
		S 20 <  ≤ 21,5cm	M 21,5 <  ≤ 23cm	L 23 <  ≤ 24,5cm	
	<b>RÉFÉRENCES</b>	G501	G502	G503	
	<b>EAN</b>	3660396006283	3660396006290	3660396006306	

- **FONCTIONNALITÉS** : Les protections plantaires agissent sur 2 facteurs complémentaires :
  - **UNE ACTION PROTECTRICE** : Les protections plantaires intègrent un gel de silicone de seulement 1.7 mm d'épaisseur qui a été spécialement développé pour répartir efficacement les pressions et absorber les frictions sans créer d'instabilité sous l'avant-pied. Elles préviennent ainsi tout risque d'échauffement, de brûlure, de formation d'ampoules ou de callosités.
  - **UNE ACTION ANTI-DOULEUR** : Les protections EPITHELIUMTACT 05 stoppent la douleur permettant ainsi de continuer la pratique sportive tout en restant performant.
- **ERGONOMIE** : Concentrés de technologie dans moins de 30g, les protections plantaires EPITHELIUM-TACT 05 ont été spécialement conçues pour les sports sollicitant fortement l'avant-pied (tennis, football, randonnée, course à pied...). Leur tenue est parfaite grâce à une bretelle de maintien intégrant des picots autobloquants, associés à un maillage en silicone créant un ancrage avec la chaussette. Peu encombrantes, elles s'adaptent dans toutes les chaussures.
- **ENTRETIEN** : Lavables en machine à 40°C.
- **PRÉCAUTIONS** : Ne pas utiliser en cas de diabète et/ou artérite. Ne pas appliquer sur une peau lésée.



**CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE DANS MOINS DE 30g**

**SANS PROTECTION**

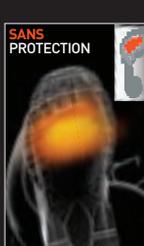

**AVEC PROTECTION**





- RESTE EN PLACE → Face extérieure avec maillage en silicone
- NE GLISSE PAS → Face intérieure avec picots en silicone
- N'ÉCHAUFFE PAS → Face intérieure tissu ultra-confortable
- SOULAGE → Module en silicone EPITHELIUMTACT
- NE S'USE PAS → Face extérieure tissu ultra-résistant

- Le module de silicone EPITHELIUMTACT est idéal pour protéger et soulager les zones soumises à des pressions ou des frottements sous l'avant-pied.

- La bretelle de maintien intégrant des picots autobloquants (en face intérieure), associés à un maillage en silicone créant un ancrage avec la chaussette (en face extérieure) garantit une tenue irréprochable.

	Mesurez le contour de votre avant-pied à son niveau le plus large.	Vendues par paire. Si vous êtes entre 2 tailles, choisissez la plus grande.		
	<b>RÉFÉRENCES</b>	S $\bigcirc < 22,5\text{cm}$	M $22,5 \leq \bigcirc < 25,5\text{cm}$	L $\bigcirc \geq 25,5\text{cm}$
	<b>EAN</b>	GCC1	GCC2	GCC3
		3660396006764	3660396006771	3660396006788

- **FONCTIONNALITÉS** : Les protections ongles bleus ont 2 actions principales :
  - **UNE ACTION PRÉVENTIVE** : Les protections ongles bleus EPITHELIUMTACT 02 sont constituées d'un gel de silicone ultra résistant d'1 mm d'épaisseur dont les propriétés viscoélastiques sont proches de celles de la peau. Les protections vont donc répartir les pressions et absorber les micro-chocs par dissipation de l'énergie dans le gel et ainsi prévenir tout risque de formation d'ongles bleus ou d'ampoules.
  - **UNE ACTION ANTI-DOULEUR** : Les protections ongles bleus EPITHELIUMTACT 02 soulagent la douleur permettant ainsi de continuer la pratique sportive tout en restant performant.
- **ERGONOMIE** : Discrètes et de faible épaisseur, les protections ongles bleus EPITHELIUMTACT 02 ont été spécialement développées pour s'adapter parfaitement dans toutes les chaussures. Leur forme spécifique, en adéquation avec l'orteil, procure un confort immédiat et assure un maintien parfait durant toute l'activité sportive même en conditions extrêmes.
- **ENTRETIEN** : Les protections sont lavables à la main et au savon.
- **PRÉCAUTIONS** : Ne pas appliquer sur une peau lésée.



**CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE DANS MOINS DE 10G**



**SANS PROTECTIONS**



**AVEC PROTECTIONS**




Tissu ultra résistant


Protection en silicone EPITHELIUMTACT lavable et réutilisable

- Le gel de silicone EPITHELIUMTACT permet la dissipation de l'énergie générée par les chocs chaussure/orteil.
- Le tissu ultra-résistant assure un bon maintien et une plus longue durée de vie. Son contact avec les autres doigts de pied est très agréable.


	Vendues pas lot de 2.				
	Les protections ongles bleus existent en différentes tailles pour homme ou pour femme.				
	<b>TAILLES</b>	<b>GROS ORTEILS</b>		<b>2<sup>ème</sup> ET 3<sup>ème</sup> ORTEILS</b>	
	<b>Femme</b>	<b>REF : G303</b>	<b>EAN : 3660396006665</b>	<b>REF : G301</b>	<b>EAN : 3660396006641</b>
<b>Homme</b>	<b>REF : G304</b>	<b>EAN : 3660396006672</b>	<b>REF : G302</b>	<b>EAN : 3660396006658</b>	

- **FONCTIONNALITÉS** : Les protections anti-ampoules ont 2 actions principales :
  - **UNE ACTION CORRECTIVE** : Les protections EPITHELIUMTACT 01 sont constituées d'un gel de silicone auto-adhésif d'1 mm d'épaisseur dont les propriétés viscoélastiques sont proches de celles de la peau. Appliquées sur les zones sensibles du pied avant la pratique sportive, elles vont répartir les pressions et absorber les frictions par dissipation de l'énergie dans le gel et ainsi prévenir tout risque de formation d'ampoules.
  - **UNE ACTION PROTECTRICE** : Les protections EPITHELIUMTACT 01 stoppent immédiatement la douleur dès leur application, permettant ainsi de continuer la pratique sportive tout en restant performant.
- **ERGONOMIE** : Sans colle, les protections anti-ampoules EPITHELIUMTACT 01 s'enlèvent sans douleur même sur les zones pileuses. Tout en conservant leurs propriétés adhésives, elles peuvent être utilisées 4 à 5 fois en moyenne. Les adhésifs fournis avec les protections assurent un maintien parfait durant toute l'activité sportive même en conditions extrêmes.
- **ENTRETIEN** : Les protections sont lavables à la main et au savon.
- **PRÉCAUTIONS** : Ne pas appliquer sur une peau lésée. Ne pas utiliser en cas de diabète et/ou artérite.

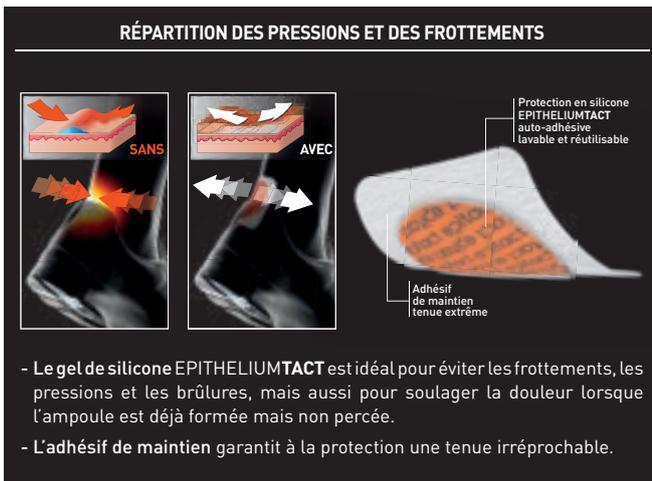

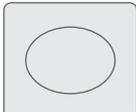	Vendues par lot de 4 protections auto-adhésives lavables et réutilisables 5 fois en moyenne + 12 adhésifs de maintien jetables fournis avec les protections.		
	FORMATS: PROTECTION forme ovale : 6 x 4,5 cm / ADHÉSIF DE MAINTIEN forme rectangulaire 9,6 x 8,4 cm		
	<b>RÉFÉRENCE</b>	G701	<b>EAN</b>

- **FONCTIONNALITÉS** : Les protections tibiales ont 2 actions principales :
  - **UNE ACTION PRÉVENTIVE** : Les protections EPITHELIUMTACT 03 sont constituées d'un gel de silicone auto-adhésif de 2 mm d'épaisseur dont les propriétés viscoélastiques sont proches de celles de la peau. Appliquées sur les tibias en contact direct avec la peau, les protections vont répartir les pressions et absorber les frictions par dissipation de l'énergie dans le gel et ainsi prévenir tout risque d'échauffement.
  - **UNE ACTION ANTI-DOULEUR** : Les protections EPITHELIUMTACT 03 soulagent aussi la douleur permettant ainsi de continuer la pratique sportive tout en restant performant.
- **ERGONOMIE** : Leur forme spécifique a été étudiée pour recouvrir parfaitement la zone sensible du tibia. Le contact avec la peau est très agréable et la protection se décolle sans douleur même sur les zones pileuses.
- **AUTRE UTILISATION** : Elles sont aussi très efficaces pour soulager les pressions et les échauffements aux épaules lors du port d'un sac à dos en randonnée.
- **ENTRETIEN** : Les protections supportent une trentaine de lavages à la main et au savon sans que les propriétés ne soient altérées.
- **PRÉCAUTIONS** : Ne pas appliquer sur une peau lésée.

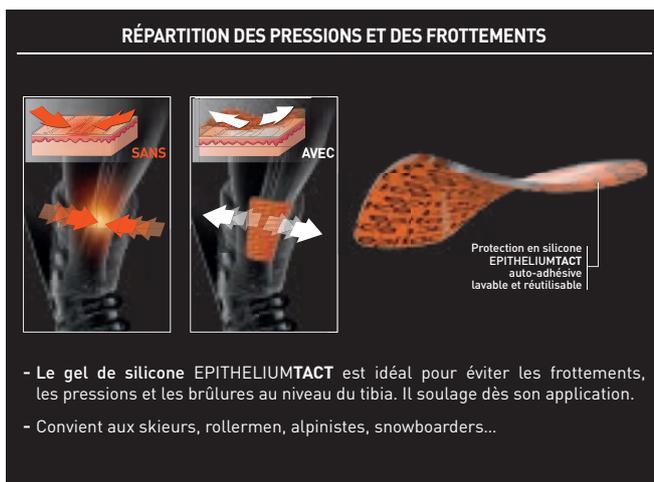

	Vendues par paire : 2 protections auto-adhésives lavables et réutilisables 30 fois en moyenne		
	FORMATS: Largeur haute : 9,5 cm / Largeur basse : 5,5 cm / Hauteur : 9,5 cm / Épaisseur : 2 mm		
	<b>RÉFÉRENCE</b>	G711	<b>EAN</b> 3660396006702

- **FONCTIONNALITÉS** : Les protections malléoles ont 2 actions principales :
  - **UNE ACTION PRÉVENTIVE** : Les protections EPITHELIUMTACT 04 sont constituées d'un gel de silicone auto-adhésif de 2 mm d'épaisseur dont les propriétés viscoélastiques sont proches de celles de la peau. Appliquées sur les malléoles en contact direct avec la peau, les protections vont répartir les pressions et absorber les frictions par dissipation de l'énergie dans le gel et ainsi prévenir tout risque d'échauffement.
  - **UNE ACTION ANTI-DOULEUR** : Les protections EPITHELIUMTACT 04 soulagent aussi la douleur permettant ainsi de continuer la pratique sportive tout en restant performant.
- **ERGONOMIE** : Les protections EPITHELIUMTACT 04 ont été spécialement conçues pour couvrir parfaitement les zones sensibles (malléoles, scaphoïdes). Le contact avec la peau est très agréable et la protection se décolle sans douleur. Vous pouvez l'enlever et la repositionner sans restrictions.
- **ENTRETIEN** : Les protections supportent une trentaine de lavages à la main et au savon sans que les propriétés ne soient altérées.
- **PRÉCAUTIONS** : Ne pas appliquer sur une peau lésée.



	Vendues par paire : 2 protections auto-adhésives lavables et réutilisables 30 fois en moyenne		
	FORMATS: Largeur haute : 6,5 cm / Largeur basse : 3,5 cm / Hauteur : 11 cm / Épaisseur : 2 mm		
	<b>RÉFÉRENCE</b>	G710	<b>EAN</b>



  
**epitact**<sup>®</sup>  
*SPORT*

**OFFRES  
COMMERCIALES**


## CAMPAGNES TV ET PRESSE INCONTOURNABLES



**76 ANNONCES PRESSE + 350 SPOTS TV DIFFUSÉS**



**Kit de démonstration  
GENOUILLÈRE  
OFFERT!**

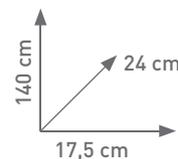


REF. 1581	PRÉSENTOIR 5 BROCHES
10 Genouillères	1 XS + 3 S + 3 M + 2 L + 1 XL
8 Orthèses hallux valgus	3 S + 3 M + 2 L
8 Protections plantaires	3 S + 3 M + 2 L
8 Protections anti-ampoules	Taille unique
8 Protections ongles bleus	2 S + 2 M + 2 L + 2 XL

\* La composition du présentoir est modulable

**PLV Sport**  
Recto randonnée  
Verso course à pieds!




REF. 1584	PRÉSENTOIR 2 BROCHES
2 Exemples de composition*:	
8 Protections plantaires + 5 Genouillères	8 Orthèses hallux valgus + 5 Genouillères

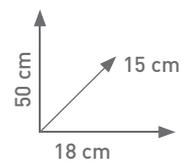

\* La composition du présentoir est modulable

## CAMPAGNE DE COMMUNICATION PRESSE INTENSIVE



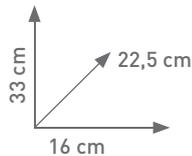

**STOP RAYON FOURNI  
AVEC LE PRÉSENTOIR**

**+ 25 GUIDES EPITACT<sup>®</sup>  
SPORT OFFERTS**



REF. 1586	PRÉSENTOIR COMPTOIR 10 GENOUILLÈRES				
TAILLES	XS	S	M	L	XL
QUANTITÉS	1	3	3	2	1